

FreeStyleリブレLinkの操作ステップ


アプリインストール時のみ実施



1 アプリダウンロード

アプリストアよりアプリをダウンロードし、インストールします。

※iOS版/Android版がご利用頂けます。

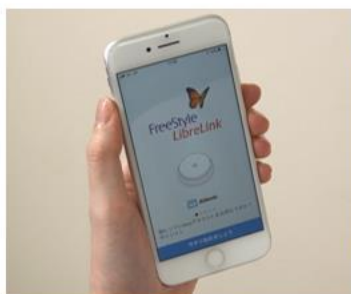

2 初期登録・設定

アプリ利用には「リブレView」アカウントが必要です。登録にはメールアドレスをご用意ください。

※リブレViewアカウント登録済みであれば、サインインし、初期設定のみでご利用頂けます。

センサー交換毎に実施



3 センサー起動

センサーを装着後、スキャンしセンサーを起動させます。

※起動には60分間必要です。
※Readerと併用する場合は必ずReaderより起動をさせてください。

毎回の測定時に実施



4 スキャン

センサーにスマートフォンを近づけスキャンします。

※iPhoneはスキャンボタンをタップし使用します。
※iPhoneは画面上部、Android端末は背部を近づけます。(機種により場所が異なる場合があります。)



5 確認

現在のグルコース値と過去8時間分の変動を示すグラフなどが表示されます。

※画面はiOS版の例です。詳しくはアプリヘルプメニュー内にある取扱説明書を参照ください。