

マンモグラフィポジショニングコンテスト

Sonic DICOM® PACS Cloud 説明書

一般審査用

日本乳癌検診学会 研修委員会

※本書の転載・複写は禁止です。

審査のお知らせとお願い

- Sonic DICOM®PACS Cloud上のすべての画像について、複製や撮影はいかなる理由またいかなる方法においても禁止です。
- Sonic DICOM®PACS Cloud ユーザアカウントの二次配布は禁止です。 厳重な管理をお願い申し上げます。
- 審査の公平性とプライバシー保護のためSonic DICOM®PACS Cloudの機能を一部制限しております。あらかじめご了承ください。
- Sonic DICOM®PACS Cloudの同時接続数制限のため、混み合う時間帯は接続できない場合がございます。その際はお時間をあけて接続していただきますようお願い申し上げます。
- 携帯電話等通信回線によっては通信料が必要です。各自のご負担で閲覧くださいますようお願い申し上げます。

○マンモグラフィポジショニングコンテスト審査に関する問い合わせ先
益田地域医療センター医師会病院 放射線技術科 山田和幸
Tel:0856-22-3611 (代表) Email:k-yamada@masumi.shimane.med.or.jp
kyamada1895@gmail.com

①ログインアカウント情報の取得

クラウドPACSアカウント情報を取得してください。

下記URLからユーザ登録してください（下記URLをクリック）。
登録後にアカウントが表示されます。

※アカウント情報は再表示されませんので、ユーザご自身で
記録しておいてください。

<https://forms.gle/fHzxCpKNj1efNzet6>



The image shows a screenshot of a Google Form titled "マンモグラフィポジショニングコンテスト クラウドPACS利用登録フォーム". The form contains several sections with text and input fields. The visible text includes "マンモグラフィポジショニングコンテスト", "クラウドPACS利用登録フォーム", and "ご登録ください". There are also some blurred text and a "送信" (Send) button at the bottom right.

② Sonic DICOM[®] PACS Cloudにログイン

インターネットに接続されたPCのブラウザソフトウェアから

Sonic DICOM[®] PACS Cloudの下記URLにアクセスしログインしてください（下記URLをクリック）。

<https://qrfs4mdm.jp1.sonicpacs.com/viewer/#/login>

ログイン画面



対応ブラウザソフトウェア



Google Chrome



Microsoft Edge



Apple Safari




Mozilla Firefox



Microsoft Internet Explorerはご使用いただけません。

③ リストから観察対象を選択


観察する検査リストの□にチェックし右上の「ビューワ」をクリックしてください。
1検査ごとに「選択」→「ビューワ」を繰り返していただくと検査切り替えが容易です。
検査をまとめて選択する方と操作が多く煩雑です。

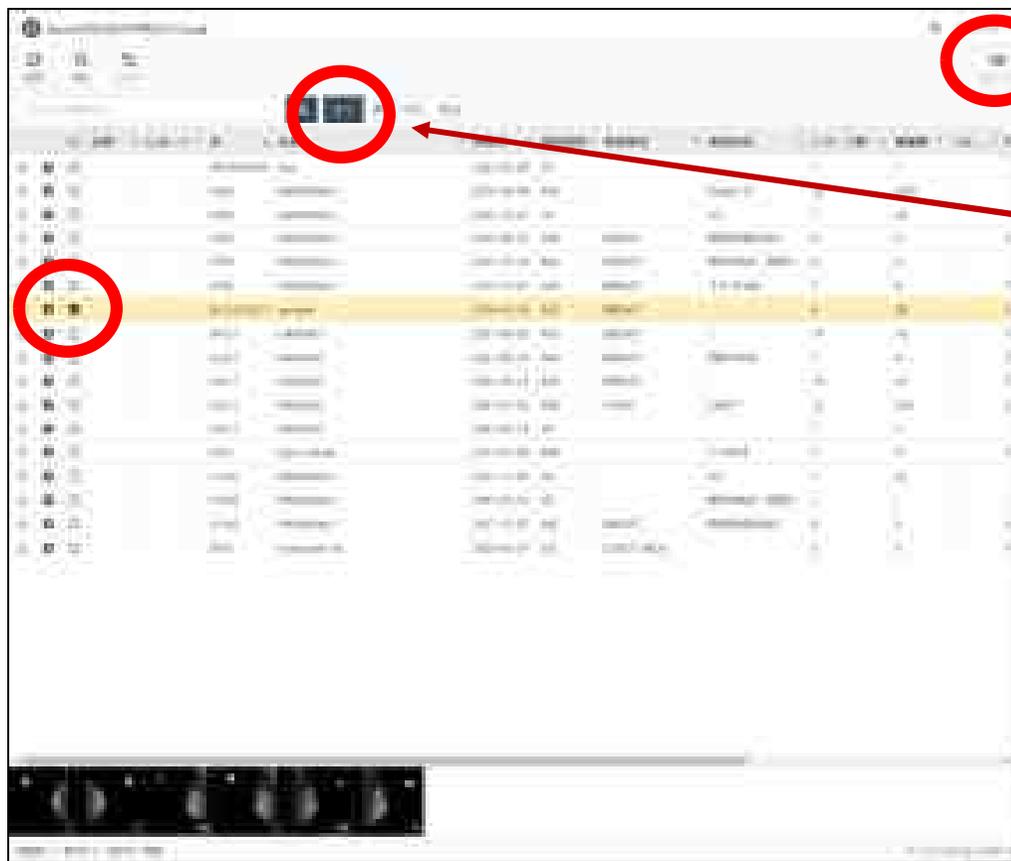

「全て」が選択されていることをご確認ください

④表示調整

ブラウザウィンドウの幅で左右マンモグラフィの表示間隔が変わります。
適宜ウィンドウ幅を調整すると胸壁側をそろえて表示することが可能です。

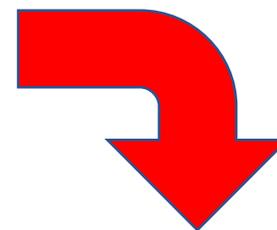


胸壁側をそろえて表示できます。
上下の余白も調整でき、マンモグラフィに撮影情報を重ねず表示できます

④ 観察・評価

サムネイルには選択患者すべての検査が表示されます。
また適宜ツールをご利用ください。

リストを表示します。
リスト画面に戻ったら必ず画面上部の「全て」を選択してください。
(②を参照)

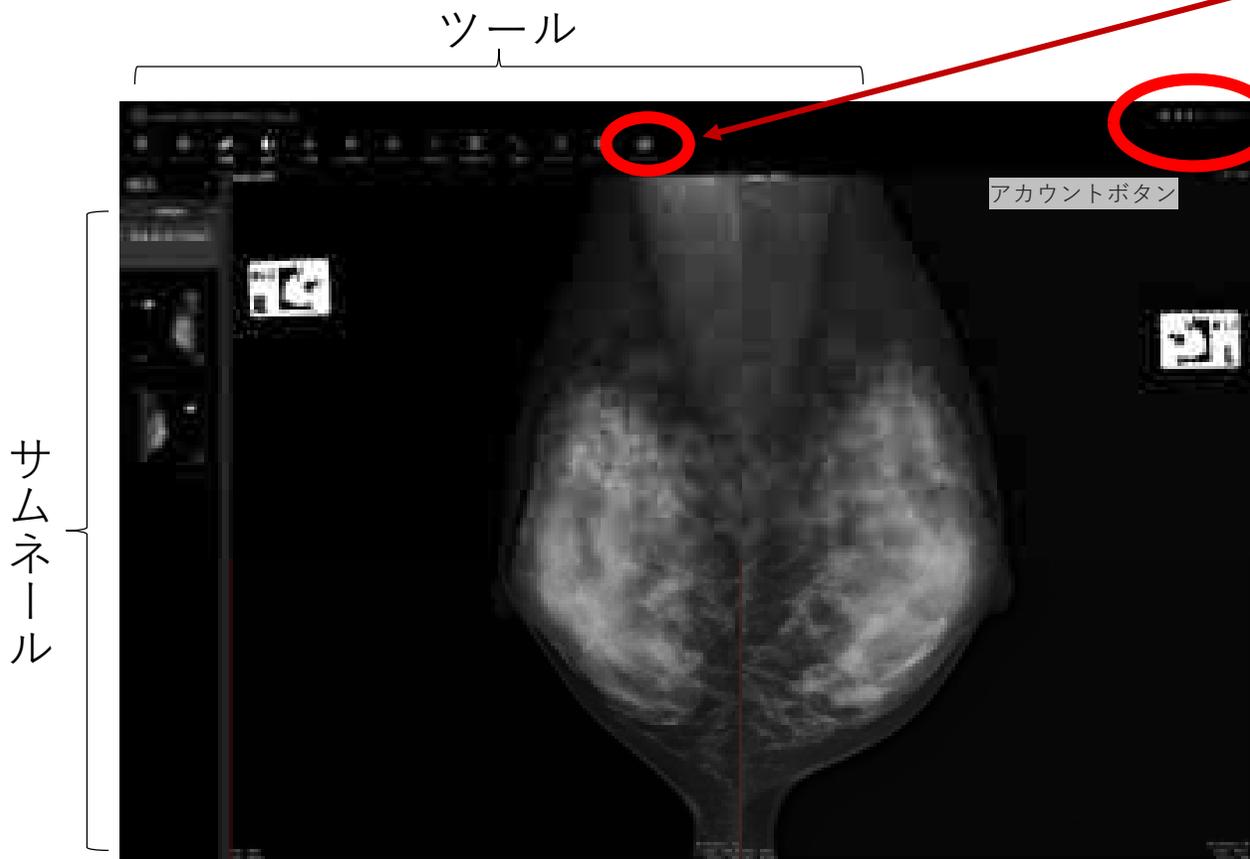

ユーザメニュー



リストを表示します。
こちらからはリストの「全て」が選択されて表示されます。

プリセットマウスジェスチャー

マウスボタン	機能
左	WW/WL
中 (ホイール)	拡大・縮小
右	移動


左 中 右
(ホイール)



⑤ 観察・評価

症例観察を重ねるとブラウザタブが増えます。タブごとに症例・リストを表示させたまま、タブ選択で表示切替えが可能です。

多数のタブは表示が重くなる可能性がございます。その際は不要なタブから削除してください。

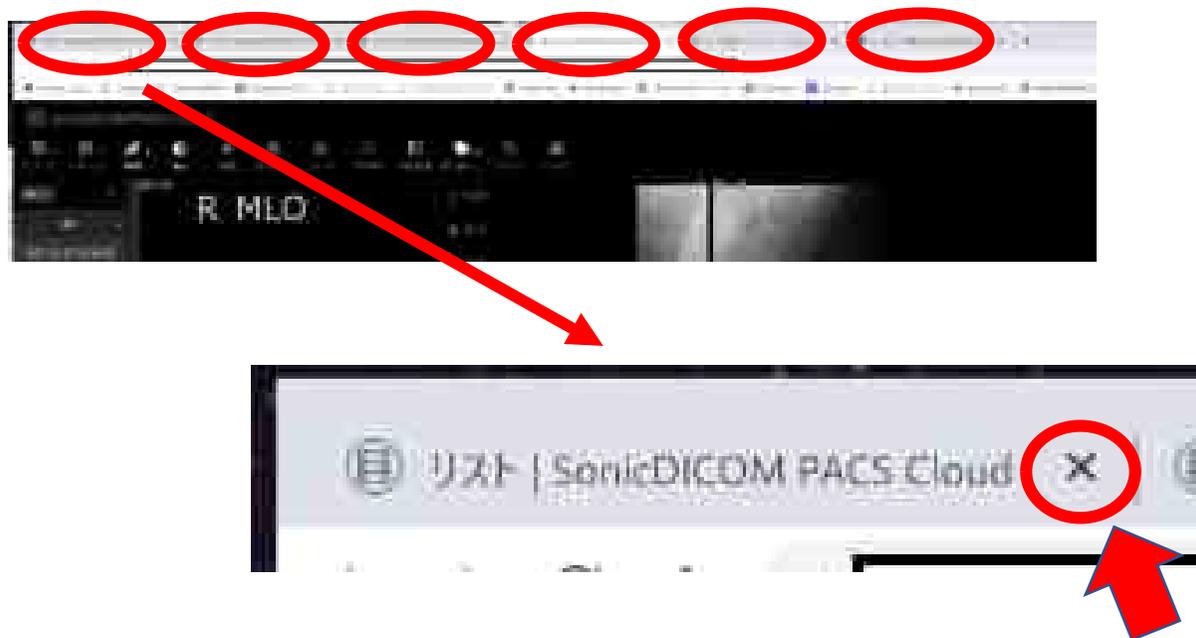

タブ削除の場合はこの「X」をクリックして下さい。

⑥投票

マンモグラフィポジショニングコンテスト一般投票フォームから投票してください。
(Googleフォーム 下記リンク、もしくはQRコードから投票してください。)

<https://forms.gle/BLNMHqbr1zzZ3Ddd7>






一般審査フォーム

※一般投票締切

令和6年11月20日 (水) 21:00

○ 補足 ユーザマニュアル参照方法

ビューワ操作方法の詳細はユーザマニュアルを参照してください。

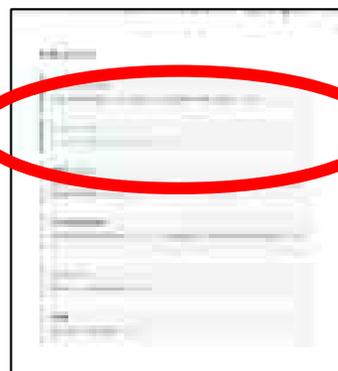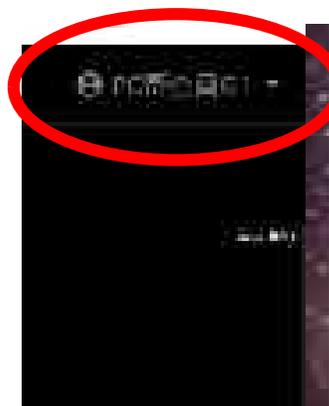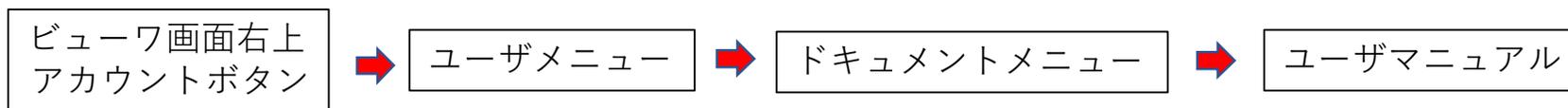

※ 審査の公平性とプライバシー保護のため、機能の一部を制限しておりますことをあらかじめご了承ください。